

お得意先 各位

## 新 発 売 の ご 案 内

謹啓 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、体外診断用医薬品、アデノウイルスキット『エルナススティック アデノウイルス』を新発売させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

発売日：2018年12月20日（木）

### 【製品情報・各種コード】

製 品 名	エルナススティック アデノウイルス	
使 用 目 的	咽頭粘膜上皮細胞又は角結膜上皮細胞中のアデノウイルス抗原の検出試薬	
測 定 原 理	免疫クロマト法	
包 装 単 位	内 容	5 回 用
	テストスティック	1 テスト/袋 × 5
	検体抽出液(500μL/チューブ)	5 本/袋 × 1
	<付属品> 検体採取用滅菌綿棒	5 本
	<付属品> チューブスタンド	1 個
承 認 番 号	22800EZX00065000	
J A N コ ー ド	4987497304551	
貯 蔵 方 法	2～30℃	
有 効 期 間	24ヶ月	
個 装 箱 サ イ ズ (mm)	幅 220 × 奥行 80 × 高さ 55	

【製品画像】

個装箱



テストスティック



キット内容



検体抽出液



操作法カード【表】

**エルナス® スティック アデノウイルス**

**結果判定例**

判定期(C)  
判定期(T)

**陽性**      **陰性**      **無効**

**陽性**：判定期(C)に赤紫色のラインと、判定期(T)に赤紫色のラインが現れます。

**陰性**：判定期(C)にのみ赤紫色のラインが現れ、判定期(T)にはラインが現れません。

**無効**：判定期(C)にラインが現れません。再検査を行ってください。

販売元  
**日東メディック株式会社**

製造販売元  
**ADITEC アドテック株式会社**

操作法カード【裏】

**エルナス® スティック アデノウイルス** 体外診断用医薬品

**検査に必要なもの**

- 検体採取用滅菌綿棒
- テストスティック
- 検体抽出液チューブ (以下チューブ)
- スタンド

**操作手順**

検体を採取した綿棒を検体抽出液に浸し、5回程度綿棒を回転させてから、引き抜いて検体液とします。

テストスティックのアデノと書かれた部分を持ち MAX を手前にして、ゆっくりとチューブの底まで押し込みます。スタンドに立てて8分後に結果を判定します。  
注) 判定時間(8分)を過ぎてから判定をしないでください。

操作の詳細は添付文書を参照してください。